

Rev. 01
Maggio 2010

 **LifeMED**

Scheda tecnica

80200.10

Strumento per magnetoterapia –
MAGNETO BASE +

 **INTERMED**
Attrezzature e strumenti medicali



Codice	Descrizione
80200.10	Apparecchio per magnetoterapia – modello MAGNETO BASE +

Indicazioni	
Produttore	LED spa
CND	Z120606
Repertorio	11707
Conformità	Dispositivo Medico di classe IIa conforme alla Direttiva CEE 93/42

Indicazioni

Apparecchio per magnetoterapia indicato per applicazioni domiciliari dotato di 2 placche in materiale semirigido, fasce elastiche con chiusura a velcro e custodia in ABS.

Descrizione

Magneto Base + è un'apparecchiatura per magnetoterapia che utilizza, a scopo terapeutico, gli effetti indotti al corpo umano dai campi magnetici a bassa frequenza. Dispositivo medico attivo ad uso temporaneo, progettato e realizzato per applicazioni domiciliari di magnetoterapia da parte dell'utilizzatore finale previa consultazione del fisioterapista o di personale medico.

Traumatologia

- Pseudoartrosi e ritardo di consolidazione delle fratture
- Fratture a rischio di pseudoartrosi
- Lesioni delle parti molli - contusioni, distorsioni, ustioni
- Algodistrofia distrettuale

INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

Reumatologia

- Reumatismi degenerativi
- Reumatismi infiammatori
- Reumatismi fibromialgici
- Necrosi ossee asettiche

Angiologia

- Arteriopatie periferiche
- Piaghe ed ulcere

Dermatologia

- Psoriasi
- Ittiosi

Endocrinologia

- Osteoporosi senile e post-menopausale

Accessori presenti all'interno della confezione

80200.10
2 placche in materiale semirigido
Fasce elastiche con chiusura a velcro
Custodia in ABS
Cavo di alimentazione
Manuale d'uso

Caratteristiche tecniche

Tensione di alimentazione	230V~ / 50-60Hz
Potenza massima assorbita	22VA
Intensità massima d'uscita	80 Gauss (8 mT)
Frequenza d'uscita	da 10 a 99 Hz
Classe di sicurezza elettrica	II BF
Grado di protezione	IP20
Dimensioni	193 x 138 x 68 mm
Peso	1,04 kg

INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
 Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

Controindicazioni e avvertenze

Si consiglia l'uso dell'apparecchiatura previa consultazione medica.

L'applicazione della magnetoterapia deve essere evitata in pazienti:

- portatori di pace-maker o altro dispositivo elettronico impiantato
- con gravi squilibri della pressione arteriosa
- cardiopatici
- con gravi malattie del sistema nervoso
- con gravi insufficienze renali
- con neoplasie in atto
- con diabete giovanile
- in età infantile-giovanile
- in stato di gravidanza
- emorragici
- epilettici
- portatori di protesi metalliche o mezzi di sintesi magnetizzabili
- portatori di protesi acustiche
- con spirale in rame.

Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Manutenzione e pulizia

Utilizzare un panno morbido leggermente imbevuto di detergente non aggressivo e schiumoso.

Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Garanzia

2 anni per difetti di fabbricazione.

Accessori

80100.80	Placca per magnetoterapia – dimensioni 120 x 70 mm
602060	Fascia elastica in velcro – dimensioni 8 x 60 cm

INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142