



Via Ludovico D'Aragona 11  
20132 Milano (MI) - Italy  
Tel. +39-02-98248016 Fax. +39-02-98247361  
www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it

## SCHEDA TECNICA

# CALZATURA FISIOLÓGICA ACTIVA 3T

Rev. 01

Giugno 2015

Codice	Misura
<b>A3T-35</b>	<b>35</b>
<b>A3T-36</b>	<b>36</b>
<b>A3T-37</b>	<b>37</b>
<b>A3T-38</b>	<b>38</b>
<b>A3T-39</b>	<b>39</b>
<b>A3T-40</b>	<b>40</b>
<b>A3T-41</b>	<b>41</b>
<b>A3T-42</b>	<b>42</b>

Codice	Misur
<b>A3T-43</b>	<b>43</b>
<b>A3T-44</b>	<b>44</b>
<b>A3T-45</b>	<b>45</b>
<b>A3T-46</b>	<b>46</b>
<b>A3T-4748</b>	<b>47-48</b>
<b>A3T-4950</b>	<b>49-50</b>

### Indicazioni Terapeutiche

Calzatura fisiologica indicata per: Alluce valgo, Dita martello, Metatarsalgie, Vasculopatie, Piede reumatico  
Piede diabetico ( ACTIVA S RIGID+ plantare personalizzato )

### Descrizione

Calzatura unisex con ampia apertura superiore per favorire la calzatura e con chiusura a velcro regolabile.

Tomaia in microfibra traspirante colore blu.

Contrafforte semirigido termoformabile e personalizzabile dal tecnico ortopedico.

Sottopiede estraibile in spugna super-soft alto 10 mm

Ampia calzatura a volume variabile

Suola con struttura monoblocco in mescola assorbi-urto e antiscivolo.

Tomaia ancorata alla suola con collante a base di acqua (privo di solventi chimici) e con cucitura di tenuta sul bordo suola.

Predisposta per l'inserimento di un plantare estraibile o di plantari personalizzati, realizzati per il trattamento di alterazioni della morfologia del piede o per la prevenzione delle algie plantari.

Disponibili a richiesta due taglie Extra-Large ( 47-48 e 49-50)

Accessori opzionali: Activa SP, Activa S Rigid ( Soletta rigida )

### Controindicazioni ed avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

### Sicurezza

La calzatura è realizzata con materiali privi di lattice e in conformità alla Direttiva RoHS 2002/95/CE.

In particolare non sono presenti le seguenti sostanze chimiche:

PBB – Polibromobifenili

PBDE – Polibromobifenileteri

Piombo e suoi composti

Composti del Cromo Esavalente

Mercurio e suoi composti

### Pulizia

Non lavare la calzatura per immersione, direttamente sotto il getto dell'acqua o in lavatrice.

Lavare con acqua tiepida, massimo 40 °C, e sapone neutro. Sono preferibili detersivi ad alta biodegradabilità. Non utilizzare prodotti aggressivi e sgrassanti (alcol, detersivi per bucato, candeggina, ammoniaca e solventi).

Evitare materiali abrasivi quali spazzole lana d'acciaio, carta vetrata e lame metalliche per l'eliminazione di eventuali macchie.

Non asciugare la calzatura umida o bagnata direttamente con fonti di calore che potrebbero comportare danni alla stessa.

**Conservazione**

Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

**Smaltimento**

I materiali utilizzati per la fabbricazione della calzatura sono di tipo parzialmente ecologico.

Pertanto devono essere smaltiti in accordo alle normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata. Si raccomanda di non disperdere il prodotto nell'ambiente.

**Produttore**

INTERMED S.r.l.  
Via Ludovico D'Aragona 11  
20132 - Milano (MI)



**Codice CND**      **Y063303**  
**N. Repertorio**

**Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CE**