

 <p>Via Ludovico d'Aragona, 11 20132 Milano (MI) - Italy Tel. +39-02-98248016 Fax. +39-02-98247361 www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it</p>	<p>SCHEMA TECNICA</p> <p>SEDIA GIREVOLE PER VASCA CON IMBOTTITURE IN POLIURETANO</p>	<p>Rev 01</p> <p>Ottobre 2010</p>
--	--	---

Codice	Descrizione
AB-33	Sedia girevole per vasca con imbottiture in poliuretano

DESCRIZIONE

Sedia girevole per vasca con seduta, schienale ed imbottiture dei braccioli in poliuretano morbido. Schienale estraibile. Braccioli ribaltabili.

Appoggi per vasca ricoperti in poliuretano morbido.

Il dispositivo può essere ruotato a 360° in quattro posizioni da 90° per facilitare l'accesso alla vasca a persone con mobilità ridotta.

Possibilità di regolazione in larghezza.

MATERIALI COMPONENTI

Struttura e braccioli	Alluminio
Seduta, schienale, imbottiture braccioli	Poliuretano
Coperture appoggi per vasca	Poliuretano

DATI TECNICI

Larghezza schienale	40 cm	Larghezza totale	56-66,5 cm
Altezza dello schienale	19 cm	Peso	7.5 kg
Altezza braccioli	27,5 cm	Portata	120 kg
Distanza tra i braccioli	41,5 cm		

PRECAUZIONI

Prima dell'utilizzo, verificare sempre il corretto posizionamento del dispositivo sui bordi della vasca. Controllare lo stato delle coperture in poliuretano morbido degli appoggi per vasca. Assicurarsi della stabilità della sedia verificando che la leva di bloccaggio posta sotto la seduta sia debitamente fissata nel foro della posizione desiderata. Accertarsi del corretto fissaggio dello schienale, dei braccioli e degli appoggi laterali. Assistere sempre gli utilizzatori con limitate capacità di deambulazione.

CONSERVAZIONE

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità.
Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Pulire dopo ogni utilizzo con panno morbido e detersivi neutri. Non impiegare sostanze acide e spugne abrasive. Disinfettare con normali sostanze a base alcolica.

Verificare periodicamente il funzionamento dei meccanismi di rotazione e la corretta tenuta delle clip di bloccaggio degli appoggi laterali, dei braccioli e dello schienale.

SMALTIMENTO

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Confezione 1 pezzo

Garanzia 24 mesi per difetti di fabbricazione

Codice CND: Y093303

Progressivo di registrazione: 331273

Produttore INTERMED srl

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE