

**COPRIPUNTA  
PER ACTIVA 8T**

<b>Codice</b>	<b>Misura</b>	<b>N° di repertorio</b>
<b>AC8-3540</b>	<b>35-40</b>	<b>1353194/R</b>
<b>AC8-4148</b>	<b>41-48</b>	<b>1353346/R</b>

**Descrizione**

Puntale di copertura per calzature post-operatorie Activa 8T applicabile con velcro al bordino della punta. L'accessorio è realizzato in panno anallergico, traspirante e lavabile. Colore blu

**Controindicazioni ed avvertenze**

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

**Pulizia**

Non lavare il copripunta per immersione, direttamente sotto il getto dell'acqua o in lavatrice. Lavare con acqua tiepida, massimo 40 °C, e sapone neutro. Sono preferibili detersivi ad alta biodegradabilità. Non utilizzare prodotti aggressivi e sgrassanti (alcool, detersivi per bucato, candeggina, ammoniaca e solventi).

Evitare materiali abrasivi quali spazzole lana d'acciaio, carta vetrata e lame metalliche per l'eliminazione di eventuali macchie. Non asciugare il copripunta umido o bagnato direttamente con fonti di calore che potrebbero comportare danni alla stesso.

**Conservazione**

Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

**Smaltimento**

I materiali utilizzati per la fabbricazione del puntale sono del tipo parzialmente ecologico. Pertanto devono essere smaltiti in accordo alle normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata. Si raccomanda di non disperdere il prodotto nell'ambiente.

**Produttore**

INTERMED S.r.l.  
Via Ludovico D'Aragona 11  
20132 - Milano (MI)

**Codice CND**      **Y063303**

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CE

