

| Codice | Descrizione |
|----------------------|--|
| ALTO+NV 39CPB | Carrozzina leggera con schienale tensionabile reclinabile, misura 39, colore blu |
| ALTO+NV 39CPR | Carrozzina leggera con schienale tensionabile reclinabile, misura 39, colore rosso |
| ALTO+NV 42CPB | Carrozzina leggera con schienale tensionabile reclinabile, misura 42, colore blu |
| ALTO+NV 42CPR | Carrozzina leggera con schienale tensionabile reclinabile, misura 42, colore rosso |
| ALTO+NV 45CPB | Carrozzina leggera con schienale tensionabile reclinabile, misura 45, colore blu |
| ALTO+NV 45CPR | Carrozzina leggera con schienale tensionabile reclinabile, misura 45, colore rosso |
| ALTO+NV 48CPB | Carrozzina leggera con schienale tensionabile reclinabile, misura 48, colore blu |
| ALTO+NV 48CPR | Carrozzina leggera con schienale tensionabile reclinabile, misura 48, colore rosso |
| ALTO+NV 51CPB | Carrozzina leggera con schienale tensionabile reclinabile, misura 51, colore blu |
| ALTO+NV 51CPR | Carrozzina leggera con schienale tensionabile reclinabile, misura 51, colore rosso |

**Descrizione**

Carrozzina ad autospinta con telaio pieghevole in alluminio indicata per pazienti che, in modo temporaneo o permanente, presentano riduzione traumatica o congenita della funzionalità degli arti inferiori.

- **Seduta** in nylon imbottito di colore nero. Possibilità di regolazione in profondità da 41 a 46 cm.
- **Schienale** reclinabile e tensionabile con coprischiena in nylon imbottito di colore nero.
- **Braccioli** ridotti ribaltabili e completamente abbattibili.
- **Leva del freno** ripiegabile.
- **Reggigambe** estraibili ed elevabili in altezza con poggiatesta regolabili in tre posizioni.
- **Pedane poggiatesta** con possibilità di regolazione in altezza e flessione-estensione.
- **Ruote posteriori** da 24" ad estrazione rapida pneumatiche.
- **Ruotini anteriori** da 6".
- **Piastra di fissaggio** per ruote posteriori con possibilità di regolazione in altezza e profondità.
- **Ruotine antiribaltamento.**
- **Mancorrenti** in alluminio.
- **Peso** a partire da 15,5 kg secondo configurazione.

Disponibile nei colori blu e rosso metallizzato.



Via della Pace, 21
20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy
Tel. +39-02-98248016 Fax. +39-02-98247361
www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it

SCHEMA TECNICA

ALTO+NV CP

CARROZZINA LEGGERA

CON SCHIENALE TENSIONABILE

RECLINABILE

Rev 00

Settembre 2012

Dati tecnici

| | ALTO+NV39 CP | ALTO+NV42 CP | ALTO+NV45 CP | ALTO+NV 48CP | ALTO+NV 51CP |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Larghezza seduta | 39 cm | 42 cm | 45 cm | 48 cm | 51 cm |
| Profondità seduta | da 41 a 46 cm | da 41 a 46 cm | da 41 a 46 cm | da 41 a 46 cm | da 41 a 46 cm |
| Altezza seduta | da 42 a 50 cm | da 42 a 50 cm | da 42 a 50 cm | da 42 a 50 cm | da 42 a 50 cm |
| Lunghezza massima | 106 cm | 106 cm | 106 cm | 106 cm | 106 cm |
| Altezza massima | da 85 a 93 cm | da 85 a 93 cm | da 85 a 93 cm | da 85 a 93 cm | da 85 a 93 cm |
| Ingombro ripiegata | 33 cm | 33 cm | 33 cm | 33 cm | 33 cm |
| Larghezza totale | 59 cm | 62 cm | 65 cm | 68 cm | 71 cm |
| Portata massima | 115 kg | 115 kg | 115 kg | 115 kg | 115kg |

Manutenzione e pulizia

Sono necessari controlli periodici per mantenere l'efficienza della carrozzina e prevenire rischi per la sicurezza dell'utente.

| | |
|--------------------|---|
| Freni | Verificare lo stato dei tamponi, eventuali movimenti di gioco e l'efficacia della frenata. |
| Tele | Verificare la tensione e lo stato generale facendo particolare attenzione alla presenza di tagli o strappi. |
| Ruote | Verificare lo stato di usura dei pneumatici. Le forcelle delle ruote anteriori devono essere ben fissate al telaio e ruotare facilmente. I perni ad estrazione rapida delle ruote posteriori devono infilarsi facilmente nella loro sede e non devono avere gioco sul diametro. |
| Mancorrenti | Verificare lo stato di usura ed il fissaggio. |
| Braccioli | Verificare lo stato delle imbottiture. Il bracciolo deve restare ben fissato senza gioco laterale. |
| Poggiapiedi | Verificare che le pedane non presentino rotture e che siano ben fissate ai supporti metallici. |
| Bulloneria | Verificare il corretto fissaggio e la tenuta di viti e bulloni. |

Conservazione e smaltimento

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità.

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Garanzia 24 mesi per difetti di fabbricazione

Riconducibilità nomenclatore

| | |
|----------------------------|--|
| Per tutte le misure | 12.21.06.039 – Carrozzina pieghevole con telaio stabilizzante 12.24.03.121 – Struttura leggera 12.24.06.172 – Braccioli ridotti 12.24.06.160 – Braccioli regolabili in altezza 12.24.21.106 – Dispositivo estrazione rapida 12.24.21.109 – Posizionamento variabile perni ruote posteriori 12.24.03.109 – Pedane estraibili, regolabili ed elevabili in altezza 12.24.06.163 – Schienale regolabile in inclinazione |
| Per le sole misure 48 e 51 | 12.24.06.175 – Variazione larghezza sedile superiore a 45 cm |

Produttore **DUPONT MEDICAL - Francia**

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE