

Rev. 01  
Aprile 2010

 **LifeMED**

## Scheda tecnica

AP.200.002

Termoforo cervicale elettrico a  
sabbia – Warmy Sand Cervicale

 **INTERMED**  
Attrezzature e strumenti medicali



Codice	Descrizione
AP.200.002	Termoforo cervicale elettrico a sabbia 75 W – modello WARMY SAND CERVICALE. Dimensioni 49 x 34 cm

Indicazioni	
Produttore	MO.ZA – Caravaggio – Italia per INTERMED S.r.l.

### Indicazioni

Termoforo riscaldante che trasmette i benefici del calore, adatto a molteplici applicazioni.

### Descrizione

Termoforo dotato di un termo protettore che in caso di uso prolungato o eccessivo calore interrompe il flusso di corrente per sicurezza della persona.

### Caratteristiche tecniche

<b>Potenza:</b>	<b>75 W</b>
<b>Temperatura:</b>	Commutatore elettrico a 2 temperature: pos. 1-30 °C + 20% Pos. 2 – 40 °C ± 20%
<b>Alimentazione:</b>	230 V – 50/60 Hz
<b>Dimensioni:</b>	49 x 34 cm

**INTERMED s.r.l.**

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it  
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

## Controindicazioni e avvertenze

Prima di utilizzare il dispositivo controllare sempre se all'interno della fodera non vi siano danni al termoforo e al cavo di alimentazione. In presenza di danni, non utilizzare il termoforo e contattare il rivenditore dal quale lo avete acquistato.

Per un uso ottimale negli anni e per evitare rischi che possono derivare da un cattivo uso del prodotto, raccomandiamo le seguenti indicazioni:

- Non è adatto per uso ospedaliero o in ambienti pregni di ossigeno
- Non è impermeabile: non utilizzare il termoforo se è bagnato; si ricorda che il termoforo funziona a corrente elettrica
- Non sedersi sul termoforo, né stropicciarlo o piegarlo (posizionare il termoforo appoggiandolo dove è necessario il calore e non sotto di esso)
- Non utilizzare il termoforo senza la fodera, non tirare il cavo e non utilizzare il cavo come maniglia
- Non usare puntine, aghi o qualsiasi altro oggetto appuntito per posizionare il termoforo nel modo desiderato
- Non utilizzarlo sui bambini, persone disabili, persone addormentate o su oggetti con ridotta sensibilità
- Non utilizzare il termoforo durante il sonno né coprirlo con coperte
- Non applicare creme o unguenti che possono aumentare il calore
- Non utilizzare il termoforo impostandolo alla massima temperatura
- Controllare frequentemente la pelle a contatto del termoforo per evitare scottature
- Scollegare il termoforo dalla rete elettrica dopo l'uso – senza eccezioni.

## Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto preferibilmente dentro la sua confezione originale. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

## Manutenzione e pulizia

Prima di procedere alle operazioni di pulizia accertarsi che il termoforo non sia collegato alla presa elettrica.

**Fodera:** rimuovere termoforo e lavare la fodera in lavatrice a massimo 30° con detersivi neutri.

**Parte interna:** quando necessario pulire con un panno umido senza detersivi o altri agenti.

## Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

## Garanzia

24 mesi per difetto di fabbricazione

### INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it  
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142