

|   |   |  |
|---|---|--|
|  <p>Via della Pace, 21<br/>20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy<br/>Tel. +39-02-98248016 Fax +39-02-98247361<br/>www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it</p> | <p><b>SCHEDA TECNICA</b></p> <p><b>CUSCINO AUTOMODELLANTE<br/>A RILASCIO D'ARIA</b></p> | <p><b>Rev 00</b></p> <p><b>Novembre 2010</b></p> |
|---|---|--|

| <b>Codice</b> | <b>Dimensioni</b> |
|---------------|-------------------|
| CA-1940       | 40 x 40 x 8 cm    |
| CA-1944       | 45 x 40 x 8 cm    |

### **Indicazioni**

Prevenzione delle lesioni da decubito per pazienti in carrozzina allo scopo di diminuire i picchi di pressione e di ridurre le forze di taglio e frizione. Consigliato per pazienti con peso non superiore ai 100 kg.

### **Descrizione**

Cuscino per la prevenzione del decubito realizzato con una particolare schiuma di poliuretano viscoelastico sviluppata e prodotta da Bayer contenuta all'interno di un involucro impermeabile in poliuretano termoplastico. I materiali sono associati ad un sistema a rilascio d'aria regolato da una valvola posta nella parte anteriore del dispositivo che consente una perfetta aderenza alla morfologia del paziente. Fodera traspirante in maglina di poliuretano con base antiscivolo.

### **Controindicazioni ed avvertenze**

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. Sebbene il dispositivo sia indicato per la prevenzione del decubito, esso non è in grado di controllare tutti i fattori che ne favoriscono l'insorgenza. Si raccomanda pertanto di monitorare con regolarità la zona interessata, di effettuare una frequente mobilizzazione del paziente e di porre particolare cura all'igiene. A tale scopo si consiglia di consultare i protocolli e le linee guida per la prevenzione delle piaghe da decubito.

### **Componenti**

#### Interno

Mousse in poliuretano viscoelastico a celle aperte prodotta da Bayer contenuta in un involucro impermeabile in poliuretano termoplastico.

#### Fodera

Parte superiore traspirante in maglina di poliestere. Parte inferiore antiscivolo in poliuretano.

### **Pulizia**

Interno. Lavare con panno umido senza immergere.

Fodera. Lavare in lavatrice alla temperatura di 40°.

Sanificare con normali disinfettanti.

### **Conservazione**

Conservare preferibilmente in posizione orizzontale, al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità.

**Confezione:** 1 pezzo

**Garanzia:** 24 mesi per difetti di fabbricazione

**Codice CND:** Y033303

**Progressivo di registrazione CA-1940:** 571391

**Progressivo di registrazione CA-1944:** 571413

**Produttore:** INTERMED srl

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE