



CA-205	CA-206
PROTEZIONE EASY PER GOMITO	PROTEZIONE EASY PER CAVIGLIA
30 x 30 cm	34 x 31 cm
peso 150 gr	peso 160 gr
colore azzurro	colore azzurro

Indicazioni

Prevenzione del decubito in pazienti allettati allo scopo di diminuire i picchi di pressione, di ridurre le forze di taglio e frizione e di favorire la circolazione d'aria.

Descrizione

Protezioni per la prevenzione del decubito realizzate con fibra cava siliconata racchiusa in una fodera di cotone con sistema di fissaggio a velcro.

L'elevata resilienza e l'alta traspirabilità consentono un'efficace azione nella prevenzione dell'insorgenza delle lesioni da decubito.

Controindicazioni e avvertenze


Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. Sebbene il dispositivo sia indicato per la prevenzione del decubito, esso non è in grado di controllare tutti i fattori che ne favoriscono l'insorgenza. Si raccomanda pertanto di monitorare con regolarità la zona interessata, di effettuare una frequente mobilizzazione del paziente e di porre particolare cura all'igiene. A tale scopo si consiglia di consultare i protocolli e le linee guida per la prevenzione delle piaghe da decubito.

Composizione

Interno Fibra cava siliconata
Fodera Cotone 100% sanforizzato

Modalità di lavaggio**Conservazione**

Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

 <p>Via della Pace, 21 20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy Tel. +39-02-98248016 Fax +39-02-98247361 www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it</p>	<p>SCHEDA TECNICA</p> <p>PROTEZIONI EASY</p> <p>IN FIBRA CAVA SILICONATA</p>	<p>Rev 00</p> <p>Agosto 2013</p>
---	---	--

Smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Confezione 1 pezzo

Garanzia 24 mesi per difetti di fabbricazione

Codice Nomenclatore 03.33.09.012

Codice CND Y033309

Numero di repertorio CA-205

CA-206

Produttore INTERMED srl

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE