

CUSCINO IN GEL FLUIDO

Codice	Descrizione
CA-49	Cuscino in gel fluido 38 x 40 cm, altezza 4 cm
CA-50	Cuscino in gel fluido 40 x 40 cm, altezza 4 cm
CA-51	Cuscino in gel fluido 42 x 42 cm, altezza 4 cm
CA-52	Cuscino in gel fluido 45 x 45 cm, altezza 4 cm
CA-53	Cuscino in gel fluido 48 x 50 cm, altezza 4 cm

Indicazioni

Prevenzione delle lesioni da decubito in pazienti costretti su carrozzine allo scopo di diminuire i picchi di pressione e di ridurre le forze di taglio e frizione.

Descrizione

Cuscino per la prevenzione del decubito composto da gel fluido e da una lastra di poliuretano racchiusi in una membrana protettiva in PVC dello spessore di 400 micron che consente il lavaggio ed impedisce la migrazione di oli minerali. Fodera di rivestimento a cerniera realizzata spalmato di poliuretano con base antiscivolo.

Materiali componenti fodera

Parte superiore	Spalmato di PU	55% Poliestere 45% Poliuretano
Parte inferiore	Tessuto antiscivolo	10% Pes-Poliestere 90% PVC
Portata		kg 110,00
Densità gel fluido		kg 40/m ³

Controindicazioni ed avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. Sebbene il dispositivo sia indicato per la prevenzione del decubito, esso non è in grado di controllare tutti i fattori che ne favoriscono l'insorgenza. Si raccomanda pertanto di monitorare con regolarità la zona interessata, di effettuare una frequente mobilizzazione del paziente e di porre particolare cura all'igiene. A tale scopo si consiglia di consultare i protocolli e le linee guida per la prevenzione delle piaghe da decubito. Si suggerisce l'utilizzo per un solo utente. In caso di riutilizzo, procedere preventivamente a sanificazione.

Modalità d'impiego

Posizionare il dispositivo con la cerniera rivolta verso lo schienale della seduta e la parte antiscivolo rivolta verso il basso.

Pulizia

Sacca: detergenti neutri o alcool.

Fodera: lavaggio a temperatura massima di 60° con detergenti neutri.



Non candeggiare



Non stirare



Non asciugare a mezzo di asciugabiancheria a tamburo



Non lavare a secco

Conservazione

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

**CUSCINO IN GEL
FLUIDO**

Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Garanzia 24 mesi per difetti di fabbricazione

Riconducibilità Nomenclatore: 03.33.03.006

Codice CND: Y033303

Numero di repertorio CA-49:

Numero di repertorio CA-50: 325728/R

Numero di repertorio CA-51: 616400/R

Numero di repertorio CA-52: 616406/R

Numero di repertorio CA-53:

Produttore **INTERMED srl**



Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE