

Codice	Descrizione
PRACTICA 39PN PRACTICA 42PN PRACTICA 45PN PRACTICA 48PN PRACTICA 51PN	Carrozzina ad autospinta con ruote posteriori piene
PRACTICA 39TN PRACTICA 42TN PRACTICA 45TN PRACTICA 48TN PRACTICA 51TN	Carrozzina da trasporto con ruote posteriori piene

DESCRIZIONI ED INDICAZIONI

Carrozzine ad autospinta e da trasporto con telaio pieghevole a doppia crociera e braccioli desk ribaltabili per persone che, in modo temporaneo o permanente, presentano delle ridotte o nulle capacità motorie di deambulazione.

Il modello PRACTICA P monta ruote posteriori piene da 24" ad estrazione rapida ed è dotata di ruotini per passaggi stretti.

Il modello PRACTICA T utilizza ruote posteriori piene da 12".

Pedane girevoli, estraibili e regolabili in altezza. Tasca posteriore. Rinforzo forcella.

Disponibili nelle misure di seduta di: 39, 42, 45, 48, 51 cm

MATERIALI COMPONENTI

Telaio e braccioli	Acciaio
Pannello braccioli	Plastica
Poggia-braccio	PU
Seduta e schienale	Nylon imbottito
Ruotini anteriori	Gomma
Ruote posteriori	Poliuretano morbido
Poggiapiedi	Plastica

DATI TECNICI

Seduta	Larghezza totale carrozzina Standard	Larghezza totale carrozzina Transito	Altezza seduta da terra	Peso
39 cm	60 cm	57 cm	51 cm	21 kg
42 cm	62 cm	59 cm	51 cm	21 kg
45 cm	64 cm	61 cm	51 cm	21 kg
48 cm	68 cm	65 cm	51 cm	21 kg
51 cm	70 cm	67 cm	51 cm	21 kg

Portata	120 kg
Diametro tubi telaio	22 mm
Diametro tubi crociera	26 mm
Ruote posteriori	24" PRACTICA P 12" per PRACTICA T
Ruote anteriori	8"

CONTROINDICAZIONI ED AVVERTENZE

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. Per un corretto utilizzo del dispositivo, consultare le "Istruzioni per l'uso".

CONSERVAZIONE

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

MANUTENZIONE E PULIZIA

Sono necessari controlli periodici per mantenere l'efficienza della carrozzina e prevenire rischi per la sicurezza dell'utente.

Freni	Verificare lo stato dei tamponi, eventuali movimenti di gioco e l'efficacia della frenata.
Tele	Verificare la tensione e lo stato generale facendo particolare attenzione alla presenza di tagli o strappi.
Ruote	Verificare lo stato di usura dei pneumatici. Le forcelle delle ruote anteriori devono essere ben fissate al telaio e ruotare facilmente. I perni ad estrazione rapida delle ruote posteriori del modello PRACTICA P devono infilarsi facilmente nella loro sede e non devono avere gioco sul diametro.
Mancorrenti	Verificare lo stato di usura ed il fissaggio.
Braccioli	Verificare lo stato delle imbottiture. Il bracciolo deve restare ben fissato senza gioco laterale.
Poggia-piedi	Verificare che le pedane non presentino rotture e che siano ben fissate ai supporti metallici.
Bulloneria	Verificare il corretto fissaggio e la tenuta di viti e bulloni.

MODALITA' DI SMALTIMENTO

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

GARANZIA

Il dispositivo è coperto da garanzia di 24 mesi per difetti di fabbricazione.

La garanzia non è applicabile a prodotti modificati o riparati senza l'accordo preventivo di Intermed srl ed alle parti soggette ad usura.

PRACTICA PN

<u>Codice CND</u>	Y122106
<u>Progressivo di registrazione</u>	PRACTICA 39PN: 1360987
	PRACTICA 42PN: 1361253/R
	PRACTICA 45PN: 1361254/R
	PRACTICA 48PN: 1361255/R
	PRACTICA 51PN: 1361256/R

PRACTICA TN

<u>Codice CND</u>	Y122103
<u>Progressivo di registrazione</u>	PRACTICA 39TN: 1361044
	PRACTICA 42TN: 1361259/R
	PRACTICA 45TN: 1361260/R
	PRACTICA 48TN: 1361261/R
	PRACTICA 51TN: 1361262/R

PRODUTTORE

INTERMED srl

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE