

Codice	Descrizione
CC-005S	Collare cervicale rigido, small
CC-005M	Collare cervicale rigido, medium
CC-005L	Collare cervicale rigido, large

Codice	Descrizione
CC-006S	Collare cervicale rigido con supporto mento, small
CC-006M	Collare cervicale rigido con supporto mento, medium
CC-006L	Collare cervicale rigido con supporto mento, large



### **Indicazioni**

- Distorsioni di media gravità.
- Nevralgie cervico-brachiali.
- Discopatie cervicali.
- Ernie discali.
- Immobilizzazioni post-operatorie del rachide cervicale.

### **Descrizione**

- Struttura composta da due fasce rigide realizzate in PVC con fori di aerazione.
- Sistema di regolazione dell'altezza a velcro.
- Fascia superiore con appoggio per mento imbottito.
- Fascia inferiore con appoggio sternale imbottito.
- Cinturino di chiusura posteriore a velcro.

### **Controindicazioni ed avvertenze**

- Le indicazioni terapeutiche riportate non costituiscono, ovviamente, elenco esaustivo. Per ulteriori e più specifiche indicazioni fare sempre riferimento a valutazione del medico specialista.
- Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. In caso di reazioni allergiche, rivolgersi immediatamente al proprio medico curante.
- Il dispositivo medico deve essere impiegato a seguito di valutazione clinica effettuata da un medico specialista il quale, dopo la diagnosi, individuerà la misura e gli eventuali adattamenti nel rispetto delle caratteristiche morfologiche del paziente. Tali adattamenti e la successiva applicazione del collare devono avvenire a cura di personale tecnico specializzato.
- Si raccomanda di verificare con regolarità l'integrità del collare e la tenuta dei sistemi di chiusura. Su indicazione ed a parere del medico specialista, effettuare controlli periodici per la verifica dell'efficacia funzionale del collare.
- Si sconsiglia, per motivi di igiene ed efficacia terapeutica, il riutilizzo del collare su altri pazienti.



**SCHEDA TECNICA**  
**COLLARE CERVICALE**  
**RIGIDO**  
**REGOLABILE IN ALTEZZA**

Rev 00

Luglio 2013

**Materiali componenti**

Fasce rigide	PVC
Imbottiture	Poliuretano espanso
Copertura imbottiture	Skay
Cinturino di chiusura	Nylon

**Dati tecnici**

<b>Modello</b>	<b>Circonferenza collo</b>
<b>CC-005S</b>	da 26 a 36 cm
<b>CC-005M</b>	da 37 a 43 cm
<b>CC-005L</b>	da 44 a 52 cm
<b>CC-006S</b>	da 26 a 36 cm
<b>CC-006M</b>	da 37 a 43 cm
<b>CC-006L</b>	da 44 a 52 cm

**Modalità di lavaggio**

Pulire con spugna morbida e detergenti neutri. Non utilizzare sostanze acide e spugne abrasive. Asciugare con panno.

**Conservazione**

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

**Smaltimento**

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

**Confezione** 1 pezzo

**Garanzia** Il dispositivo è coperto da garanzia di due anni per difetti di fabbricazione. La garanzia non comprende eventuali anomalie derivanti da utilizzo non idoneo. La garanzia non si applica in caso di riparazioni non autorizzate dal fabbricante ovvero nel caso di parti o componenti soggetti ad usura.

**Produttore** **INTERMED srl**

**Codice CND** **Y060312**  
**N. Repertorio** **CC-005S 1051450/R**  
**CC-005M 1051926/R**  
**CC-005L 1051927/R**  
**CC-006S 1051928/R**  
**CC-006M 1051929/R**  
**CC-006L 1051930/R**

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE