

<b>Codice</b>	<b>Diametro</b>	<b>CND</b>	<b>N. REPERTORIO</b>
<b>CN-100.780</b>	cm 35	V0803	19960/R
<b>CN-100.781</b>	cm 40	V0803	44231/R
<b>CN-100.782</b>	cm 43	V0803	44328/R
<b>CN 100.783</b>	cm 45	V0803	44289/R

**LATEX FREE**

<b>CN 100.784</b>	Pompetta (accessorio optional)
-------------------	--------------------------------

**Destinazione d'uso**

Il dispositivo ha lo scopo di alleviare la compressione durante la posizione seduta. La ciambella deve essere gonfiata con aria prima dell'uso. E' disponibile una pompetta come accessorio optional.

**Controindicazioni ed avvertenze**

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.  
Gonfiare il prodotto esclusivamente con aria.  
Non utilizzare su cute lesa.

**Composizione**

Ciambella: Gomma  
Valvola: Acciaio  
Tappo: Plastica

**Pulizia e manutenzione**

Non aprire il tappo durante le operazioni di pulizia.  
La superficie esterna può essere pulita con acqua tiepida e un detergente neutro non aggressivo.  
Non mettere a contatto con oggetti taglienti, appuntiti o abrasivi.

**Conservazione**

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

**Confezione** 1 pezzo

**Garanzia:** 12 mesi per difetti di fabbricazione

**Produttore** **INTERMED srl**

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE