

Codice	Descrizione
CO-100.902	Vello antidecubito sintetico

Indicazioni

Prevenzione del decubito allo scopo di diminuire i picchi di pressione, di ridurre forze di taglio e frizione e di favorire la circolazione di aria.

Come usare il dispositivo

Stendere il vello sul letto o sulla carrozzina in modo che rimanga perfettamente disteso.

Avvertenze

Il dispositivo è indicato per la prevenzione del decubito.

Ciò nonostante esso non è in grado di controllare tutti i fattori che favoriscono la formazione di piaghe da decubito. Si raccomanda pertanto di monitorare con regolarità la zona interessata, di effettuare una frequente mobilitazione del paziente e di porre particolare cura all'igiene.

A tale scopo si consiglia di consultare i protocolli e le linee guida per la prevenzione delle piaghe da decubito. Non adagiare il paziente a contatto del vello a pelle nuda se la zona interessata presenta già ulcere da pressione. Può provocare allergie in soggetti predisposti.

Se si sospetta il rischio di allergie, evitare il contatto diretto con la pelle interponendo un lenzuolo tra l'epidermide ed il vello.

Non esporre a fiamme libere.

Composizione

Lana naturale.

Dimensioni

Lunghezza **100 cm**

Larghezza media **50 cm**

Conservazione e lavaggio

Per conservare inalterate le proprietà della lana, si raccomanda di esporre frequentemente il vello all'aria aperta.

Lavare in lavatrice ad una temperatura massima di 30°C con detergenti specifici per lana naturale contenenti lanolina.

Asciugare all'aria aperta o nell'asciugatrice a ciclo delicato.

Non asciugare sui termosifoni.

Per riportare il vello alla forma originaria, stendere la pelle mentre è ancora umida.

Garanzia

24 mesi per difetto di fabbricazione.

Produttore

Kaiser Naturfellprodukte - Dreikirchen - Germania

Codice CND: Y033306

Progressivo di registrazione: 166837

Dispositivo medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE