

Rev. 01  
Aprile 2010

 **LifeMED**

## Scheda tecnica

D-01.78.107

Dermatoscopio mini 3000

 **INTERMED**  
Attrezzature e strumenti medicali



| Codice      | Descrizione  |
|-------------|--|
| D-01.78.107 | dermatoscopio mini 3000 con piastrina senza scala millimetrata |

| Indicazioni |  |
|-------------|--|
| Produttore  | <b>HEINE Optotechnik, Herrsching (Germany)</b>                   |
| CND         | Z12040108  |
| Repertorio  | 84805/R  |
| Conformità  | Dispositivo Medico di classe I conforme alla Direttiva CEE 93/42 |

### Indicazioni

Il dermatoscopio HEINE mini 3000 è stato progettato per l'esame clinico della superficie cutanea.

### Descrizione

Dermatoscopio HEINE mini 3000 da 2,5V con piastrina di contatto Ø 23mm senza scala, manico a batterie mini 3000 con 2 batterie alcaline AA incluse, 10 ml di olio per dermatoscopia, compendio. In blister.

Dermatoscopio tascabile dal design compatto con ottica di qualità. Ingrandimento 10x con regolazione della messa a fuoco. Attacco a vite in metallo.

- 10x ingrandimenti. Grande campo, ricchezza di dettagli.
- Solida costruzione in metallo. Robusto e di lunga durata.
- Tecnologia alogena XHL Xenon. Luce bianca e concentrata per un'illuminazione eccellente.
- Clip con interruttore integrato acceso/spento. Spegnimento automatico quando si aggancia al taschino.
- Dettagliato compendio con atlante fotografico incluso.
- Facilita la diagnosi differenziale delle lesioni pigmentate.
- Pregiata struttura in lega al cromo/plastica arricchita. Antiurto, robusta, a presa sicura.

**INTERMED s.r.l.**

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it  
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

## Accessori presenti all'interno della confezione

|                                 |
|---------------------------------|
| D-01.78.107                     |
| 10 ml di olio per dermatoscopia |
| N° 2 batterie AA                |
| Compendio                       |

## Caratteristiche tecniche

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Peso:                         | 180 g. circa                                       |
| Dimensioni testina:           | larghezza x altezza x profondità - 32 x 54 x 47 mm |
| Temperatura di utilizzo:      | + 10°C ~+ 35°C, umidità relativa 30% - 90%         |
| Temperatura di conservazione: | -20°C ~+ 50 °C, umidità relativa 10% - 95%         |
| Temperatura di trasporto:     | -40°C ~+ 70 °C, umidità relativa 10% - 95%         |

## Controindicazioni e avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

## Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

## Manutenzione e pulizia

Per procedere alla pulizia e sterilizzazione staccare la piastrina di contatto dal dermatoscopio.

Le piastrine di grandezza standard possono essere pulite, disinfettate e sterilizzare anche in autoclave (fino a 134 gradi C° per 5 minuti).

La piastrina di contatto piccola (diam. 8 mm) e la testina del dermatoscopio possono essere pulite con un panno imbevuto di alcool o disinfettante. Non immergere mai queste parti in soluzioni sterilizzanti, non portarle ad ebollizione, non mettere in autoclave.

## Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

## Garanzia

5 anni per difetti di fabbricazione.

## INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it  
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142