

Rev. 00
Gennaio 2015

 **LifeMED**

Scheda tecnica

D-008.78.132

Dermatoscopio NC1

 **INTERMED**
Attrezzature e strumenti medicali



Codice	Descrizione
D-008.78.132	Dermatoscopio NC1 con manico mini 3000 da 2,5 V

Indicazioni	
Produttore	HEINE Optotechnik Herrsching (Germany)
CND	Z12040108
Repertorio	1257793/R
Conformità	CEE 93/42 Dispositivi Medici, Classe I

Indicazioni

Per dermatoscopia non a contatto di lesioni pigmentate e per la diagnosi precoce di melanomi cutanei maligni.

Descrizione

Dermatoscopio per esame senza contatto – Velocità e precisione di diagnosi per soddisfare gli elevati requisiti richiesti dalla pratica quotidiana.

Con illuminazione polarizzata per l'esame approfondito di strutture cristalline e vascolari senza utilizzo di liquidi di contatto.

Ottica di precisione HEINE con ingrandimento 6x – il sistema ottico acromatico di alta qualità fornisce un'immagine molto nitida e ad alta risoluzione.

LED HQ – il nuovo standard di illuminazione LED fornisce una luce chiara assolutamente omogenea con esatta resa cromatica – temperatura di colore 5000K, indice di resa cromatica (CRI)>80, in particolare per i toni del rosso R9 >35 con fondo scala di 100. Diagnosi precisa grazie all'esatta resa cromatica.

Inoltre inserendo il disco di contatto opzionale, l'NC1 si trasforma in un dermatoscopio tradizionale con scala e maggiore ingrandimento (9x).

INTERMED s.r.l.

via Ludovico d'Aragona, 11 – 20132 Milano (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

FUNZIONALITA' CON QUALITA' HEINE



Diagnosi senza contatto che unisce un'elevata velocità di esame con una distanza professionale. Ampio campo di visione, profondità di campo estremamente elevata con ingrandimento 6x.



Valutazione accurata delle strutture cristalline e vascolari, senza riflessi.



Una piastrina di contatto magnetica con ingrandimento 9x assicura immagini di alta qualità per una diagnosi più precisa.

Accessori presenti all'interno della confezione

D-008.78.132
Manico mini 3000 da 2,5 V

Caratteristiche tecniche

Ingrandimento:	6x
Temperatura ambiente per l'uso:	da 10 °C a 40 °C
Illuminazione:	Alta intensità, luce bianca emessa da Diodi (LED) Classe 1 (sec. 60825-1). Data la lunga vita dei LED questi non richiedono sostituzione.
Alimentazione:	Manico HEINE mini 3000 a batterie da 2,5V
Indice di resa cromatica:	80 IRC
Temperatura di colore:	5000 Kelvin
Norme applicate:	EN 60825-1, EN ISO 10993-1

Controindicazioni e avvertenze

Prima di ogni utilizzo verificate il funzionamento corretto dell'apparecchio!

Non utilizzate l'apparecchio se rilevate danneggiamenti.

E' vietato l'utilizzo in ambiente a rischio di incendio od esplosione, per esempio a causa di ossigeno o sostanze anestetiche.

Utilizzare solo pezzi ed accessori ed fonti di energia originali HEINE.

Affidare le riparazioni solo da personale specializzato e qualificato.

Non guardare direttamente verso la fonte di luce.

INTERMED s.r.l.

via Ludovico d'Aragona, 11 – 20132 Milano (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
 Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

I dermatoscopi non sono adatti per l'esame dell'occhio.

La garanzia per l'intero prodotto decade se si usano prodotti non originali HEINE, pezzi di ricambio non originali e se vengono effettuati interventi (in particolare riparazioni o modifiche) da parte di persone non autorizzate da HEINE.

Se non utilizzate l'apparecchio per lungo tempo, togliete le batterie.

Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto.

Manutenzione e pulizia

Gli apparecchi non necessitano di manutenzione.

È necessario attenersi alle avvertenze relative all'igienizzazione sulla base delle norme, leggi e direttive nazionali.

Prima della preparazione sterile fare raffreddare l'apparecchio.

Se si sospetta una contaminazione, procedere ad una igienizzazione.

Le misure descritte per la pulizia e disinfezione non sostituiscono l'applicazione delle norme di funzionamento valide di volta in volta.

HEINE Optotechnik autorizza solo le sostanze e procedimenti indicati nel manuale d'uso.

Modalità di smaltimento

Il prodotto deve essere smaltito in un centro di raccolta differenziata per apparecchi elettrici ed elettronici. Devono essere rispettate le norme di smaltimento specifiche nazionali.

Garanzia

5 anni per difetti di fabbricazione.

Accessori

D-000.78.115	Piastrina di contatto con scala
--------------	---------------------------------

INTERMED s.r.l.

via Ludovico d'Aragona, 11 – 20132 Milano (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
 Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142