

Rev. 01
Maggio 2012



Scheda tecnica

FROST 009

Sacco gelatina



Codice	Descrizione
FROST009	Compressa riutilizzabile caldo – freddo in gel – 14 x 24 cm

Indicazioni	
Produttore	Dispotech srl
CND	M9099
Repertorio	270073
Conformità	Dispositivo di classe medica I conforme alla Direttiva CEE 93/42

Indicazioni

Grazie all'ottima qualità del materiale di rivestimento e del suo contenuto il sacchetto mantiene il caldo o il freddo per un periodo di tempo superiore ad una borsa del ghiaccio o dell'acqua calda. Il sacchetto raggiunge la temperatura della fonte di refrigerazione o di calore.

Descrizione

Sacchetto di gelatina riutilizzabile adatto per uso freddo ed uso caldo.

Busta esterna in PE con tre termosaldature in modo da garantire la resistenza alle alte e basse temperature, la termosaldabilità e l'impermeabilità.

Terapia del caldo: Acqua calda – porre la compressa in acqua bollente per 7 minuti. Estrarre dall'acqua, asciugare, inserire nella bustina protettiva o avvolgerla con un panno. Applicare sulla parte da trattare.
Microonde – Porre la compressa nel forno a microonde a max. 785-800 Watt per massimo 2 minuti. Estrarre dal forno, inserire nella bustina protettiva o avvolgerla con un panno. Applicare sulla parte da trattare.

Terapia del freddo: Freezer – porre la compressa freezer per almeno 1 ½ - 2 ore. Estrarre dal freezer,

INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

asciugare, inserire nella bustina protettiva o avvolgerla con un panno. Applicare sulla parte da trattare

Caratteristiche tecniche

Contenuto: glicole propilenico, blu di metilene, idrossimetilcellulosa, acqua.

Controindicazioni e avvertenze

Prodotto per uso esterno. In caso di ingestione ricorrere immediatamente all'intervento del medico..

Conservazione

Conservare a temperatura ambiente, lontano da fonti di calore, fiamme libere o scintille.

Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Scadenza

5 anni dalla data di produzione. Viene riportata sulla cupola della bomboletta.



INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142