

Misura	Codice
Unica	GN-003

**Indicazioni**

- Distorsioni lievi e postumi di traumi distorsivi.
- Sindrome rotulea.
- Lassità legamentosa leggera.

Descrizione

- Ginocchiera aperta realizzata in neoprene e poliestere con stabilizzatore rotuleo.
- Tre cinghie di stabilizzazione in nylon con sistema di chiusura a velcro.
- Triplo ordine di stecche a spirale laterali estraibili per coadiuvare il movimento dell'articolazione.

Controindicazioni ed avvertenze

- Le indicazioni terapeutiche riportate non costituiscono, ovviamente, elenco esaustivo. Per ulteriori e più specifiche indicazioni fare sempre riferimento a valutazione del medico specialista.
- Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. In caso di reazioni allergiche, rivolgersi immediatamente al proprio medico curante.
- Il dispositivo medico deve essere impiegato a seguito di valutazione clinica effettuata da un medico specialista il quale, dopo la diagnosi, individuerà la misura e gli eventuali adattamenti nel rispetto delle caratteristiche morfologiche dell'arto del paziente. Tali adattamenti e la successiva applicazione della ginocchiera devono avvenire a cura di personale tecnico specializzato.
- Si raccomanda di verificare con regolarità l'integrità della ginocchiera, la tenuta dei sistemi di chiusura ed il corretto funzionamento delle stecche a spirale. Su indicazione ed a parere del medico specialista, effettuare controlli periodici per la verifica dell'efficacia funzionale della ginocchiera.
- Si sconsiglia, per motivi di igiene ed efficacia terapeutica, il riutilizzo del tutore su altri pazienti.

Materiali componenti

Tessuto esterno	Poliestere
Tessuto interno	Neoprene
Cinghie di stabilizzazione	Poliestere
Chiusure	Nylon
Stecche	Metallo
Stabilizzatore rotuleo	Gomma

Il neoprene contiene lattice.

Dati tecnici

Modello	Altezza
GN-003	260 mm

Modalità di lavaggio

Rimuovere le sei stecche in metallo e procedere al lavaggio secondo le seguenti indicazioni:

**Conservazione**

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Confezione 1 pezzo

Garanzia Il dispositivo è coperto da garanzia di due anni per difetti di fabbricazione. La garanzia non comprende eventuali anomalie derivanti da utilizzo non idoneo. La garanzia non si applica in caso di riparazioni non autorizzate dal fabbricante ovvero nel caso di parti o componenti soggetti ad usura.

Produttore **INTERMED srl**

Codice CND **Y061209**
N. Repertorio **987514/R**

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE