

Rev. 01
Maggio 2010

 LifeMED

Scheda tecnica

LITTMANN LIGHTWEIGHT

Stetofonendoscopio per
l'auscultazione negli adulti

 INTERMED
Attrezzature e strumenti medicali



| Codice | Descrizione |
|--------|---|
| 2456 | Stetofonendoscopio ideale per infermieri impegnati in aree critiche, con testina ovoidale in metallo e resina composita - Rosa |
| 2455 | Stetofonendoscopio ideale per infermieri impegnati in aree critiche, con testina ovoidale in metallo e resina composita – Verde metallizzato |
| 2452 | Stetofonendoscopio ideale per infermieri impegnati in aree critiche, con testina ovoidale in metallo e resina composita – Blu caraibi |
| 2450 | Stetofonendoscopio ideale per infermieri impegnati in aree critiche, con testina ovoidale in metallo e resina composita - Nero |
| 2454 | Stetofonendoscopio ideale per infermieri impegnati in aree critiche, con testina ovoidale in metallo e resina composita – Azzurro cielo perlato |
| 2453 | Stetofonendoscopio ideale per infermieri impegnati in aree critiche, con testina ovoidale in metallo e resina composita – Lilla perlato |
| 2451 | Stetofonendoscopio ideale per infermieri impegnati in aree critiche, con testina ovoidale in metallo e resina composita - Amaranto |

| Indicazioni | |
|-------------|---|
| Produttore | 3M Health Care-St. Paul, Minnesota – U.S.A. |
| CND | C9005 |
| Repertorio | 798847 |
| Conformità | Dispositivo medico Marcatura di conformità CE secondo Decreto Legislativo 46/97 e successive modifiche – Direttiva CEE 93/42 – Classe I |

Indicazioni

Lo stetofonendoscopio 3M Littmann™ Lightweight II S.E. è lo stetoscopio ideale per il personale infermieristico e paramedico.

Lo stetofonendoscopio 3M Littmann™ Lightweight II S.E. è indicato per l'auscultazione della pressione

INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

sanguigna e valutazioni diagnostiche preliminari. Per esclusivo utilizzo professionale.

Descrizione

Lo stetofonendoscopio 3M Littmann™ Lightweight II S.E. è adatto sia per l'auscultazione della pressione sanguigna, che per esigenze di diagnosi preliminari.

Combina la testina dal design ovoidale con la possibilità di utilizzo mono-faccia.

Le principali caratteristiche sono:

- la testina in Metallo/resina composita, con diaframma in fibra di vetro epossidica
- il tubo auricolare in PVC speciale, resistente alla fessurazione e all'invecchiamento
- la ghiera "anti-freddo" in neoprene
- le olivette morbide 3M Littmann™ brevettate, in silicone
- l'archetto biauricolare leggero, in lega di alluminio anodizzato utilizzato anche per applicazioni Aerospaziali

La membrana fluttuante brevettata permette di rilevare sia le basse che le alte frequenze, senza dover ruotare la testina.

Per la rilevazione delle basse frequenze è sufficiente esercitare una leggera pressione sulla testina.

Per la rilevazione delle alte frequenze, invece, occorre esercitare una maggiore pressione.

Lo strumento non contiene lattice di gomma naturale né gomma naturale lavorata.

Marchi di qualità

3M Health Care USA è stata certificata dal BSI conforme ai requisiti e alle norme tecniche EN ISO 9002 e EN 46002 inerenti i "sistemi di qualità" per la fabbricazione, il controllo, il confezionamento, ecc. dei dispositivi medici su scala industriale, in relazione alle prescrizioni della Direttiva n. 93/42/CEE.

La costante osservanza dei requisiti procedurali ed operativi riconosciuti dalla rilasciata certificazione di "Quality Assurance" è sorvegliata e mantenuta da un insieme di ispezioni periodiche interne ed esterne, allo scopo di assicurare nel tempo la rispondenza dei diversi lotti di produzione alle specifiche di prodotto predeterminate e quindi l'uniformità e la costanza del livello qualitativo di produzione.

Le unità produttive 3M Health Care sono inoltre assoggettate all'autorizzazione ed alle ispezioni periodiche dell'FDA, Food and Drug Administration – l'ente federale statunitense responsabile per il controllo e la vigilanza sulla produzione ed il commercio di farmaci, dispositivi medici, alimentari, ecc.- che richiede l'osservanza delle pertinenti "GMPs", Good Manufacturing Practices (Norme di Buona Fabbricazione).

3M Italia SpA, consociata italiana di 3M USA, è a sua volta certificata UNI EN ISO 9001 e UNI EN 46002 dall'Ente di Certificazione CSQ di Milano accreditato dal Sincert.

Controindicazioni e avvertenze

Seguire attentamente le istruzioni del libretto illustrativo annesso alla confezione.

Lo stetoscopio 3M Littmann™ Lightweight II S.E. può essere pulito con alcool o acqua leggermente insaponata.

Lo stetoscopio non va immerso in alcun liquido, né sterilizzato a vapore.

Se la sterilizzazione fosse necessaria, bisognerebbe applicare la sterilizzazione a ossido di etilene.

Conservazione

Il prodotto deve essere conservato a temperatura ambiente compresa tra i 15° e i 30° C, al riparo da condizioni estreme di umidità, da polveri, agenti inquinanti, ecc.

INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

Evitare il calore eccessivo, il freddo, il contatto con solventi e sostanze oleose.

Lo stetoscopio 3M Littmann™ Lightweight II S.E. è garantito contro difetti dei componenti e di fabbricazione, per due anni a decorrere dalla data di acquisto comprovata dall'invio della cartolina di garanzia regolarmente timbrata dal rivenditore e compilata.

Presso il vostro abituale rivenditore di stetoscopi 3M Littmann™ sono disponibili delle olivette di ricambio.

Modalità di smaltimento

Lo smaltimento dello strumento divenuto inutilizzabile deve essere effettuato in accordo alle normative vigenti relative ai rifiuti sanitari.

Il materiale utilizzato per il confezionamento dei singoli pezzi e delle unità di vendita è totalmente riciclabile.

Garanzia

2 anni per difetti di fabbricazione.



INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142