

Codice	Dimensioni totali
MA-120	cm 193 x 86 x 15

Indicazioni

Materasso studiato per la prevenzione delle piaghe da decubito per pazienti allettati a medio-alto rischio. Portata 120 kg. Raccomandato:

- per pazienti a rischio di decubito in prossimità dell'area sacrale, occipitale e del tallone;
- per degenze postoperatorie prolungate;
- per i casi di perdita d'autonomia.

Descrizione

Materasso in mousse viscoelastica a memoria di forma con supporto in espanso ad alta resilienza. La concezione innovativa del materasso contribuisce a minimizzare i rischi di piaghe da decubito nelle zone a maggior rischio come l'area sacrale, l'occipitale ed il tallone. Gli alveoli del supporto in espanso, infatti, riducono considerevolmente la compressione della mousse in prossimità di tali aree.

Dispositivo dotato di fodera integrale, impermeabile ai liquidi e permeabile all'aria, con cerniera su tre lati.

Controindicazioni ed avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

Dopo avere posizionato il materasso e prima di stendere il paziente sul letto controllare che l'altezza complessiva non risulti eccessiva rispetto alle condizioni dell'utilizzatore. Qualora ciò si verifici, si consiglia di dotare il letto di sistemi di protezione.

Sebbene il dispositivo sia indicato per la prevenzione del decubito, esso non è in grado di controllare tutti i fattori che ne favoriscono l'insorgenza. Si raccomanda pertanto di monitorare con regolarità la zona interessata, di effettuare una frequente mobilitazione del paziente e di porre particolare cura all'igiene. A tale scopo si consiglia di consultare i protocolli e le linee guida per la prevenzione delle piaghe da decubito.

Principi

- Adattabilità a tutte le morfologie
- Distribuzione omogenea della pressione del corpo
- Mantenimento del corpo in uno stato di galleggiamento
- Riduzione della compressione della schiuma viscoelastica
- Mantenimento dello spessore della schiuma a memoria di forma ad un livello ottimale per la prevenzione delle lesioni da decubito

Componenti

Materasso

Parte superiore in schiuma viscoelastica densità 80 kg/m³ - Classe 4 reazione al fuoco

Supporto in espanso ad alta resilienza 37 kg/m³ - Classe 4 reazione al fuoco

Fodera

Tessuto Phamatex 25% poliestere 75% poliuretano - Classe 1 reazione al fuoco (EN 597-1 – EN 597-2)

Modalità di lavaggio e disinfezione

Fodera lavabile fino alla temperatura 60°. Non candeggiare. Non stirare. Non lavare a secco. Possibilità di asciugatura a tamburo a temperature moderate.

Mousse ed espanso lavabili con panno morbido umidificato.

Disinfezione con vapori di formaldeide a 45° per 3 ore.

Conservazione

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità.

Dopo un'esposizione prolungata alla luce, l'espanso tende ad ingiallire senza però perdere le caratteristiche meccaniche e terapeutiche.



Via della Pace, 21
20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy
Tel. +39-02-98248016 Fax +39-02-98247361
www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it

SCHEDA TECNICA
MATERASSO IN ESPANSO
E VISCOELASTICO
Flexi Form

Rev 00

Novembre 2010

Garanzia

36 mesi per difetti di fabbricazione

Codice Nomenclatore 03.33.06.006

Produttore PHARMA OUEST INDUSTRIES, Francia

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE