

Codice	Dimensioni totali
MA-140	cm 193 x 88 x 17

Indicazioni

Materasso studiato per la prevenzione delle piaghe da decubito per pazienti allettati a medio-alto rischio.

Portata 140 kg. Raccomandato:

- in casi di lesioni vascolari cerebrali;
- in casi di decorso postoperatorio ortopedico;
- in casi di emiplegia;
- in casi di paraplegia.

Descrizione

Materasso in mousse viscoelastica a memoria di forma con supporto in espanso ad alta resilienza. Il design combinato di mousse ed espanso scanalato rende il dispositivo particolarmente indicato in situazioni di rischio dell'integrità cutanea e perdita d'autonomia.

Dispositivo dotato di fodera integrale, impermeabile ai liquidi e permeabile all'aria, con cerniera su tre lati.

Base antiscivolo.

Controindicazioni ed avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

Dopo avere posizionato il materasso e prima di stendere il paziente sul letto controllare che l'altezza complessiva non risulti eccessiva. Qualora ciò si verificasse si consiglia di dotare il letto di sistemi di protezione.

Sebbene il dispositivo sia indicato per la prevenzione del decubito, esso non è in grado di controllare tutti i fattori che ne favoriscono l'insorgenza. Si raccomanda pertanto di monitorare con regolarità la zona interessata, di effettuare una frequente mobilitazione del paziente e di porre particolare cura all'igiene. A tale scopo si consiglia di consultare i protocolli e le linee guida per la prevenzione delle piaghe da decubito.

Principi

- Adattabilità a tutte le morfologie
- Distribuzione omogenea della pressione del corpo
- Mantenimento del corpo in uno stato di galleggiamento
- Riduzione della fonti di attrito

Componenti

Materasso

Parte superiore in schiuma viscoelastica densità 80 kg/m³ - Classe 4 reazione al fuoco

Supporto in espanso ad alta resilienza 37 kg/m³ - Classe 4 reazione al fuoco

Fodera

Parte superiore e laterale in Tessuto Phamatex 25% poliestere 75% poliuretano - Classe 1 reazione al fuoco (EN 597-1 – EN 597-2)

Base antiscivolo 100% polipropilene - Classe 1 reazione al fuoco (EN 597-1 – EN 597-2)

Modalità di lavaggio e disinfezione

Fodera lavabile fino alla temperatura 60°. Non candeggiare. Non stirare. Non lavare a secco. Possibilità di asciugatura a tamburo a temperature moderate.

Mousse ed espanso lavabili con panno morbido umidificato.

Disinfezione con vapori di formaldeide a 45° per 3 ore.

Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto.

Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Dopo un'esposizione prolungata alla luce, l'espanso tende ad ingiallire senza però perdere le caratteristiche meccaniche e terapeutiche.



Via della Pace, 21
20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy
Tel. +39-02-98248016 Fax +39-02-98247361
www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it

SCHEDA TECNICA
MATERASSO IN ESPANSO
E VISCOELASTICO
Vita Form

Rev 00

Novembre 2010

Garanzia

24 mesi per difetti di fabbricazione

Codice Nomenclatore 03.33.06.003

Produttore PHARMA OUEST INDUSTRIES, Francia

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE