

Rev. 01  
Maggio 2010

 **LifeMED**

## Scheda tecnica

LITTMANN MASTER CLASSIC II

Fonendoscopio per adulti

 **INTERMED**  
Attrezzature e strumenti medicali



Codice	Descrizione
2141	Fonendoscopio per adulti con membrana fluttuante, ghiera antifreddo e testina monofaccia in acciaio inossidabile – Black edition
2143	Fonendoscopio per adulti con membrana fluttuante, ghiera antifreddo e testina monofaccia in acciaio inossidabile – Viola
2144	Fonendoscopio per adulti con membrana fluttuante, ghiera antifreddo e testina monofaccia in acciaio inossidabile – Nero
2146	Fonendoscopio per adulti con membrana fluttuante, ghiera antifreddo e testina monofaccia in acciaio inossidabile – Burgundy
2147	Fonendoscopio per adulti con membrana fluttuante, ghiera antifreddo e testina monofaccia in acciaio inossidabile – Blu navy
2630	Fonendoscopio per adulti con membrana fluttuante, ghiera antifreddo e testina monofaccia in acciaio inossidabile – Blu caraibi
2632	Fonendoscopio per adulti con membrana fluttuante, ghiera antifreddo e testina monofaccia in acciaio inossidabile – Verde foresta
2633	Fonendoscopio per adulti con membrana fluttuante, ghiera antifreddo e testina monofaccia in acciaio inossidabile – Azzurro cielo
2634	Fonendoscopio per adulti con membrana fluttuante, ghiera antifreddo e testina monofaccia in acciaio inossidabile – Verde pino
2142G	Fonendoscopio per adulti con membrana fluttuante, ghiera antifreddo e testina monofaccia in acciaio inossidabile – Gold edition

Indicazioni	
Produttore	<b>3M Health Care-St. Paul, Minnesota – U.S.A.</b>
CND	C9005
Repertorio	21610/R

**INTERMED s.r.l.**

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it  
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

Conformità	Dispositivo medico Marcatura di conformità CE secondo Decreto Legislativo 46/97 e successive modifiche – Direttiva CEE 93/42 – Classe I
------------	---

## Indicazioni

Il fonendoscopio 3M™ Littmann™ Master Classic II è indicato per l'auscultazione dei toni cardiaci e polmonari a scopo medico diagnostico.

Per esclusivo utilizzo professionale.

## Descrizione

Il 3M™ Littmann™ Master Classic II è dotato di una testina con nuovo design che migliora il responso acustico e di una speciale membrana brevettata che consente, al variare della pressione esercitata sulla testina, di auscultare sia le alte che le basse frequenze senza dover sollevare e ruotare lo strumento.

Le principali caratteristiche sono:

- la testina in zinco con diaframma in fibra di vetro epossidica
- il tubo auricolare in PVC speciale, resistente alla fessurazione e all'invecchiamento
- la ghiera "anti-freddo" in neoprene
- l'archetto biauricolare leggero, in alluminio con doppia molla interna
- le olivette morbide 3M™ Littmann™ brevettate, in silicone
- lunghezza: 69 cm
- peso: 155 g.

Lo strumento non contiene lattice di gomma naturale nè gomma naturale lavorata.

## Caratteristiche tecniche

Parametri rilevati:	Suoni provenienti dal corpo umano
Testina:	in acciaio inossidabile – diametro membrana 45 mm
Peso:	155 g.
Lunghezza tubo:	69 cm.

## Marchi di qualità

3M Health Care USA è stata certificata dal BSI conforme ai requisiti e alle norme tecniche EN ISO 9002 e EN 46002 inerenti i "sistemi di qualità" per la fabbricazione, il controllo, il confezionamento, ecc. dei dispositivi medici su scala industriale, in relazione alle prescrizioni della Direttiva n. 93/42/CEE.

La costante osservanza dei requisiti procedurali ed operativi riconosciuti dalla rilasciata certificazione di "Quality Assurance" è sorvegliata e mantenuta da un insieme di ispezioni periodiche interne ed esterne, allo scopo di assicurare nel tempo la rispondenza dei diversi lotti di produzione alle specifiche di prodotto predeterminate e quindi l'uniformità e la costanza del livello qualitativo di produzione.

Le unità produttive 3M Health Care sono inoltre assoggettate all'autorizzazione ed alle ispezioni periodiche dell'FDA, Food and Drug Administration – l'ente federale statunitense responsabile per il controllo e la vigilanza sulla produzione ed il commercio di farmaci, dispositivi medici, alimentari, ecc.- che richiede l'osservanza delle pertinenti "GMPs", Good Manufacturing Practices (Norme di Buona Fabbricazione).

3M Italia SpA, consociata italiana di 3M USA, è a sua volta certificata UNI EN ISO 9001 e UNI EN 46002

## INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it  
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

dall'Ente di Certificazione CSQ di Milano accreditato dal Sincert.

## Controindicazioni e avvertenze

Seguire attentamente le istruzioni del libretto illustrativo annesso alla confezione.

Il fonendoscopio 3M™ Littmann™ Master Classic II può essere pulito con alcool o acqua leggermente insaponata.

Il fonendoscopio non va immerso in alcun liquido, ne sterilizzato a vapore.

Se la sterilizzazione fosse necessaria, bisognerebbe applicare la sterilizzazione a ossido di etilene.

## Conservazione

Il prodotto deve essere conservato a temperatura ambiente compresa tra i 15° e 30° C, al riparo da condizioni estreme di umidità, da polveri, agenti inquinanti, ecc. . .

Evitare il calore eccessivo, il freddo, il contatto con solventi e sostanze oleose.

Il fonendoscopio 3M™ Littmann™ Master Classic II è garantito contro difetti dei componenti e di fabbricazione, per tre anni a decorrere dalla data di acquisto comprovata dall'invio della cartolina di garanzia regolarmente timbrata dal rivenditore e compilata.

Presso il vostro abituale rivenditore di stetoscopi 3M™ Littmann™ sono disponibili delle olivette di ricambio.

## Modalità di smaltimento

Lo smaltimento dello strumento divenuto inutilizzabile deve essere effettuato in accordo alle normative vigenti relative ai rifiuti sanitari.

Il materiale utilizzato per il confezionamento dei singoli pezzi e delle unità di vendita è totalmente riciclabile.

## Garanzia

2 anni per difetti di fabbricazione.

## Accessori

36556	Ghiera + membrana per Littmann Select colore nero
36557	Ghiera + membrana per Littmann Select colore grigio
37811	Olive morbide a pressione – colore nero
37812	Olive morbide a pressione – colore grigio
37808	Olive rigide a pressione – colore grigio
37809	Olive piccole morbide a pressione – colore nero
2170	Targhetta identificativa fonendo/stetoscopio
BLMACL/N	Biauricolare

## INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it  
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142