

Codice	Descrizione
PLASTIK 42	Carrozzina in plastica misura 42
PLASTIK 48	Carrozzina in plastica misura 48



### Descrizione

Carrozzina ad autospinta con telaio pieghevole a doppia crociera completamente realizzata in plastica.

- **Seduta** in nylon di colore nero.
- **Schienale** estraibile in nylon di colore nero.
- **Braccioli** estraibili con pannello laterale in nylon.
- **Reggigambe** estraibili regolabili in altezza con fascia ferma-gambe in nylon.
- **Ruote posteriori** piene da 24".
- **Ruotini anteriori** da 8".
- **Barra posteriore** per accompagnatore.

### Destinazione d'uso

Dispositivi indicati per pazienti che, in modo temporaneo o permanente, presentano riduzione traumatica o congenita della funzionalità degli arti inferiori. La circostanza specifica che siano realizzati completamente in plastica, consente di prefigurare impieghi in ambienti particolari:

- a contatto con acqua;
- in reparti ospedalieri MRI di diagnostica immagine e risonanza magnetica;
- ai controlli di sicurezza in aeroporti, tribunali, palazzi istituzionali, aziende orafe ed in genere dove è richiesta una particolare attenzione alla sicurezza.

### **Dati tecnici**

	<b>Plastik 42</b>	<b>Plastik 48</b>
Larghezza seduta	42 cm	48 cm
Larghezza telo in nylon	39 cm	45 cm
Profondità seduta	39 cm	39 cm
Altezza seduta da terra	54 cm	54 cm
Larghezza totale	67 cm	73 cm
Lunghezza comprese pedane	108 cm	108 cm
Altezza totale	86 cm	86 cm
Ingombro chiusa	36 cm	36 cm
Peso	19 kg	20 kg
Portata massima	100 kg	120 kg

### **Manutenzione e pulizia**

Per mantenere l'efficienza della carrozzina e prevenire rischi per la sicurezza dell'utente in fase di utilizzo si rendono necessari alcuni controlli periodici.

- Freni** Verificare lo stato dei tamponi, eventuali movimenti di gioco e l'efficacia della frenata.  
**Tele** Verificare la tensione e lo stato generale facendo particolare attenzione alla presenza di tagli o strappi.  
**Ruote** Verificare lo stato di usura dei pneumatici. Le forcelle delle ruote anteriori devono essere ben fissate al telaio e ruotare facilmente.  
**Mancorrenti** Verificare lo stato di usura ed il fissaggio.  
**Braccioli** Il bracciolo deve restare ben fissato senza gioco laterale.  
**Poggiapiedi** Verificare che le pedane non presentino rotture e che siano ben fissate ai supporti.

### **Conservazione e smaltimento**

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità.  
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

**Garanzia** 24 mesi per difetti di fabbricazione

**Produttore** INTERMED srl

**Codice CND** Y122103

**Progressivi di registrazione**

Plastik 42

Plastik 48

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE