

Rev. 01  
Dicembre 2014



## Scheda tecnica

PM-100

Borsa ghiaccio e acqua calda



Codice	Descrizione
PM-100	Borsa ghiaccio e acqua calda

Indicazioni	
Produttore	Bihua Industry Corp.
CND	V0401
Repertorio	1249651/R
Conformità	Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE

### Indicazioni

Utilizzata per la terapia antalgica e del calore.

### Descrizione

Borsa ghiaccio e per acqua calda multiuso, semplice da utilizzare con un tappo di chiusura ermetico a vite.

### Caratteristiche tecniche

Diametro:	28 cm
Capacità:	2300 cc
Materiale:	Poliuretano termoplastico

### Controindicazioni e avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

Riempire esclusivamente con acqua ad una temperatura tra -30°C e +60°.

Quando si utilizza la borsa per la terapia del calore, riempiarla prima con acqua fredda e poi con acqua calda.

#### INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it  
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

Porre particolare attenzione alle variazioni di calore della borsa durante l'applicazione su persone con una scarsa sensibilità al calore o circolazione sanguigna carente.

## Conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

## Pulizia

Prima di utilizzare il dispositivo la prima volta risciacquare l'interno della borsa con acqua tiepida. La superficie esterna può essere pulita quando necessario con acqua tiepida e detergente neutro non aggressivo.

Dopo ogni uso svuotare il contenuto e lasciare asciugare completamente il dispositivo prima di avvitare il tappo e riporlo.

In caso di inutilizzo prolungato prima di riavvitare il tappo lasciare all'interno un certo quantitativo di aria per evitare l'adesione delle pareti della borsa.

Non mettere a contatto con oggetti taglienti, appuntiti o abrasivi.

## Modalità di smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.



### INTERMED s.r.l.

Via della Pace, 21 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) • Tel +39 0298248016 • Fax +39 0298247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it  
Sede legale: Via Besana, 5 – 20122 Milano • Cap.Soc. 51.640 € i.v. • C.F./P.IVA 11703230158 • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142