

Codice	Descrizione
PRACTICA ET39	Carrozzina da trasporto misura 39
PRACTICA ET42	Carrozzina da trasporto misura 42
PRACTICA ET45	Carrozzina da trasporto misura 45
PRACTICA ET48	Carrozzina da trasporto misura 48
PRACTICA ET51	Carrozzina da trasporto misura 51

Descrizione ed indicazioni

Carrozzine da trasporto con telaio pieghevole in acciaio e braccioli desk ribaltabili indicata per pazienti che, in modo temporaneo o permanente, presentano riduzione traumatica o congenita della funzionalità degli arti inferiori. Le misure 39, 42 e 45 sono dotate di crociera singola. Le misure 48 e 51 sono equipaggiate di doppia crociera.

- Ruote posteriori piene.
- Pedane estraibili e regolabili.
- Fascia ferma-gambe regolabile in nylon.
- Cintura addominale con chiusura anteriore tramite fibbia di plastica.
- Freni registrabili in acciaio.
- Maniglie di spinta in materiale plastico.
- Colore nero martellato.

**Materiali componenti**

Telaio e braccioli	Acciaio
Pannello braccioli	Plastica
Poggia-braccio	PVC imbottito
Seduta e schienale	Nylon imbottito
Ruotini anteriori	PVC
Ruote posteriori	PU morbido
Poggiapiedi	Plastica
Fascia ferma-gambe	Nylon

Controindicazioni ed avvertenze

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

Per un corretto utilizzo del dispositivo, consultare le "Istruzioni per l'uso".

Dati tecnici

Portata misure 39, 42 e 45 **120 kg**
Portata misure 48 e 51 **140 kg**
 Diametro tubi telaio 22 mm
 Diametro tubi crociera 26 mm
 Diametro ruote posteriori 300 mm
 Diametro ruote anteriori 200 mm con spessore 25 mm

Seduta	Larghezza totale	Altezza seduta	Peso
39 cm	52 cm	50 cm	da 19 kg
42 cm	55 cm	50 cm	da 19 kg
45 cm	58 cm	50 cm	da 19 kg
48 cm	61 cm	50 cm	da 19 kg
51 cm	64 cm	50 cm	da 19 kg

Conservazione e smaltimento

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari. Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Manutenzione e pulizia

Sono necessari controlli periodici per mantenere l'efficienza della carrozzina e prevenire rischi per la sicurezza dell'utente.

Freni Verificare lo stato dei tamponi, eventuali movimenti di gioco e l'efficacia della frenata.
Tele Verificare la tensione e lo stato generale facendo particolare attenzione alla presenza di tagli o strappi.
Ruote Verificare lo stato di usura dei pneumatici. Le forcelle delle ruote anteriori devono essere ben fissate al telaio e ruotare facilmente.
 Controllare periodicamente lo stato generale e la funzionalità dei perni.
Braccioli Verificare lo stato delle imbottiture. Il bracciolo deve restare ben fissato senza gioco laterale.
Poggia-piedi Verificare che le pedane non presentino rotture e che siano ben fissate ai supporti metallici.
Bulloneria Verificare il corretto fissaggio e la tenuta di viti e bulloni.

Garanzia

Il dispositivo è coperto da garanzia di 24 mesi per difetti di fabbricazione. La garanzia non è applicabile a prodotti modificati o riparati senza l'accordo preventivo di Intermed srl ed alle parti soggette ad usura.

Codice CND **Y122103**
Repertorio **PRACTICA ET39 1146894/R**
 PRACTICA ET42 1146993/R
 PRACTICA ET45 1146994/R
 PRACTICA ET48 1146995/R
 PRACTICA ET51 1146996/R

Produttore **INTERMED srl**

Accessori disponibili

PE-20P Pedane elevabili misura 39
PE-20 Pedane elevabili misura 42, 45, 48 e 51
PE-11D Bracciolo lungo destro
PE-11S Bracciolo lungo sinistro

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE

