



Codice	Descrizione
PRACTICA L39	Carrozzina leggera misura 39
PRACTICA L42	Carrozzina leggera misura 42
PRACTICA L45	Carrozzina leggera misura 45
PRACTICA L48	Carrozzina leggera misura 48
PRACTICA L51	Carrozzina leggera misura 51



Descrizione

Carrozzina ad autospinta con telaio pieghevole in alluminio a doppia crociera indicata per pazienti che, in modo temporaneo o permanente, presentano riduzione traumatica o congenita della funzionalità degli arti inferiori.

- **Seduta** in nylon imbottito di colore nero.
- **Schienale** in nylon imbottito di colore nero.
- **Braccioli** ribaltabili ed estraibili con poggibraccio in poliuretano e pannello laterale in plastica.
- **Blocco freno** in alluminio.
- **Reggigambe** estraibili con possibilità di rotazione verso l'interno o verso l'esterno.
- **Pedane poggiapiedi** in plastica con ferma-tallone. Possibilità di regolazione in altezza e possibilità di microregolazione in flessione-estensione.
- **Ruote posteriori** piene da 24" ad estrazione rapida.
- **Ruotini anteriori** da 8" con forcella in alluminio a tre posizioni di regolazione.
- **Piastra di fissaggio** per ruote posteriori con possibilità di regolazione in altezza e profondità.
- **Ruotine per passaggi stretti** con possibilità di duplice regolazione in altezza.
- **Mancorrenti** in alluminio.
- **Peso** a partire da 15,00 kg secondo configurazione.
- **Possibilità di applicare sulla medesima struttura ruote posteriori da 12,5"** previa rimozione delle ruote ad estrazione rapida, delle relative piastre di regolazione e dei ruotini per passaggi stretti.

Dati tecnici

	PRACTICA L39	PRACTICA L42	PRACTICA L45	PRACTICA L48	PRACTICA L51
Larghezza seduta	39 cm	42 cm	45 cm	48 cm	51 cm
Profondità seduta	42 cm	42 cm	42 cm	42 cm	42 cm
Larghezza totale	59 cm	62 cm	65 cm	68 cm	71 cm
Altezza seduta	52 cm	52 cm	52 cm	52 cm	52 cm
Altezza schienale	41 cm	41 cm	41 cm	41 cm	41 cm
Altezza totale	96 cm	96 cm	96 cm	96 cm	96 cm
Portata	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg

Manutenzione e pulizia

Per mantenere l'efficienza della carrozzina e prevenire rischi per la sicurezza dell'utente in fase di utilizzo si rendono necessari alcuni controlli periodici.

- Freni** Verificare lo stato dei tamponi, eventuali movimenti di gioco e l'efficacia della frenata.
- Tele** Verificare la tensione e lo stato generale facendo particolare attenzione alla presenza di tagli o strappi.
- Ruote** Verificare lo stato di usura dei pneumatici. Le forcelle delle ruote anteriori devono essere ben fissate al telaio e ruotare facilmente.
I perni ad estrazione rapida delle ruote posteriori devono infilarsi facilmente nella loro sede e non devono avere gioco sul diametro.
- Mancorrenti** Verificare lo stato di usura ed il fissaggio.
- Braccioli** Verificare lo stato delle imbottiture. Il bracciolo deve restare ben fissato senza gioco laterale.
- Poggiapiedi** Verificare che le pedane non presentino rotture e che siano ben fissate ai supporti metallici.
- Bulloneria** Verificare il corretto fissaggio e la tenuta di viti e bulloni.

Conservazione e smaltimento

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità.
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Garanzia 24 mesi per difetti di fabbricazione

Accessori

- PL-1** Kit ruote posteriori da 12,5"
PL-2 Braccioli desk regolabili in altezza
PL-3 Pedane elevabili in altezza
PL-4 Ruotine antiribaltamento

Riconducibilità nomenclatore

- Per tutte le misure 12.21.06.039 – Carrozzina pieghevole con telaio stabilizzante
12.24.03.121 – Struttura leggera
12.24.03.118 – Struttura a doppia crociera rinforzata
12.24.06.172 – Braccioli ridotti
12.24.21.106 – Dispositivo estrazione rapida
12.24.21.109 – Posizionamento variabile perni ruote posteriori
- Per le sole misure 48 e 51
PL-2 - Accessorio 12.24.06.175 – Variazione larghezza sedile superiore a 45 cm
12.24.06.160 – Braccioli regolabili in altezza

Produttore

INTERMED srl

Codice CND

Y122103

Progressivi di registrazione

- Practica L - 39 **831389**
Practica L - 42 **831390**
Practica L - 45 **831392**
Practica L - 48 **831393**
Practica L - 51 **831394**

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE