

Misura	Codice
S	TS-004S
M	TS-004M
L	TS-004L
XL	TS-004XL
XXL	TS-004XXL



Indicazioni

- Immobilizzazione in caso di fratture clavicolari.
- Immobilizzazione in fase di cure post-operatorie all'alto superiore.
- Immobilizzazione in caso di tendiniti, lussazioni e distorsioni.
- Immobilizzazione antalgica di braccio e avambraccio.

Descrizione

- Culla sagomata per l'alloggiamento dell'avambraccio.
- Cinghie di supporto imbottite con sistema di regolazione a velcro.
- Fascia di immobilizzazione per braccio-torace con sistema di chiusura a velcro.

Controindicazioni ed avvertenze

- Le indicazioni terapeutiche riportate non costituiscono, ovviamente, elenco esaustivo. Per ulteriori e più specifiche indicazioni fare sempre riferimento a valutazione del medico specialista.
- Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. In caso di reazioni allergiche, rivolgersi immediatamente al proprio medico curante.
- Il dispositivo medico deve essere impiegato a seguito di valutazione clinica effettuata da un medico specialista il quale, dopo la diagnosi, individuerà la misura e gli eventuali adattamenti nel rispetto delle caratteristiche morfologiche dell'arto del paziente. Tali adattamenti e la successiva applicazione dell'immobilizzatore devono avvenire a cura di personale tecnico specializzato.
- Si raccomanda di verificare con regolarità l'integrità dell'immobilizzatore e la tenuta dei sistemi di chiusura. Su indicazione ed a parere del medico specialista, effettuare controlli periodici per la verifica dell'efficacia funzionale dell'immobilizzatore.
- Si sconsiglia, per motivi di igiene ed efficacia terapeutica, il riutilizzo dell'immobilizzatore su altri pazienti.

Materiali componenti

Imbottitura	Poliuretano
Tessuto interno	Cotone 80%, Poliammide 20%
Tessuto esterno	Poliammide

Dati tecnici

Modello	Altezza culla	Lunghezza fascia di immobilizzazione
TS-004S	20 cm	100 cm
TS-004M	23 cm	110 cm
TS-004L	24 cm	120 cm
TS-004XL	25 cm	135 cm
TS-004XXL	27 cm	150 cm

Modalità di lavaggio**Conservazione**

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Smaltimento

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Confezione 1 pezzo

Garanzia Il dispositivo è coperto da garanzia di due anni per difetti di fabbricazione. La garanzia non comprende eventuali anomalie derivanti da utilizzo non idoneo. La garanzia non si applica in caso di riparazioni non autorizzate dal fabbricante ovvero nel caso di parti o componenti soggetti ad usura.

Produttore INTERMED srl

Codice CND Y060624
N. Repertorio TS-004S
TS-004M
TS-004L
TS-004XL
TS-004XXL

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE